

# EVER Pharma D-mine® Pumpe

## Gebrauchsanweisung



## 5.2.2 UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

### Medikamentenabgabe stoppen

Verändern Sie die Einstellung der Uhrzeit nur während Behandlungspausen. Stoppen Sie zuerst die Abgabe


Kapitel 3.4




⚠ Wenn Sie die Uhrzeit ändern, dann hat das Einfluss auf die Medikamenten-Menge des laufenden Tages. Je nach Änderung wird ein Teil der Tagesmenge wiederholt oder ausgelassen.


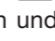




### Funktion Uhrzeit/Datum auswählen

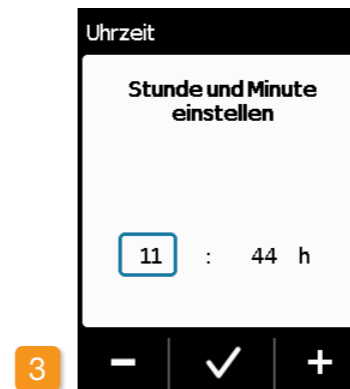Wählen Sie im Menü **Geräteeinstellungen** die **Uhrzeit** aus und drücken Sie .




### Stunde einstellen


Stellen Sie mit Hilfe der Tasten  und  die aktuelle Stunde ein und schließen Sie mit  ab.

 Die selbe Vorgehensweise anwenden um die Minuten einzustellen.




### Zeiteinstellung bestätigen


Überprüfen Sie die neue Zeiteinstellung und bestätigen Sie mit .

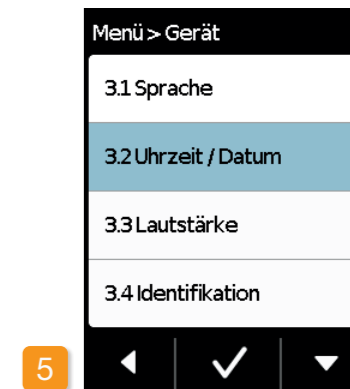

### Medikamentenabgabe wieder starten

Mit  gelangen Sie zum Hauptbildschirm. Starten Sie dort wieder die Medikamentenabgabe.

Kapitel 3.4

 Die selbe Vorgehensweise anwenden um das Datum einzustellen, siehe nächste Seite.